

COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL

AMOSTRAS SATISFATÓRIAS

- ! Manter o pé bem aquecido com roupas e meias antes da coleta. Não colha o sangue em ambientes frios.

AMOSTRA IDEAL



- Deposite o sangue nos cinco espaços delimitados do papel filtro e evite contato das manchas com qualquer superfície.
- Use uma grande gota de sangue para formar uma mancha adequada no papel filtro. Se a mancha ficar pequena pode-se adicionar uma segunda gota exatamente em cima da primeira.
- O sangue deve atingir o verso do papel filtro. Se não atingir, não adicione outra gota no verso. Colha uma nova mancha em papel filtro adicional (sem código de barra), ou faça nova coleta completa no outro pé.

AMOSTRA ACEITÁVEL



As manchas não são circulares mas preenchem adequadamente a área delimitada.

AMOSTRA ACEITÁVEL



As manchas são menores, mas ainda atingem o verso e o tamanho é suficiente para o picote no laboratório.

AMOSTRA ACEITÁVEL



Apresenta mais de uma mancha em alguns espaços delimitados. A área de contato das duas manchas é aceitável.

AMOSTRAS INSATISFATÓRIAS


- ! Não envie amostras insatisfatórias. A solicitação de uma nova amostra pelo laboratório atrasará o tratamento de uma criança afetada.

ASPECTO DE DILUIÇÃO DE SANGUE



As manchas aparentam aspecto de diluição. Provavelmente houve contato com algum líquido (soro, água, álcool, etc).

SANGUE NÃO ATINGIU O VERSO

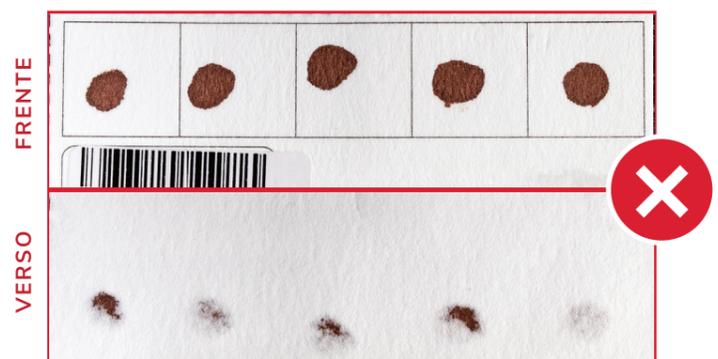


As manchas de sangue não atingiram o verso do papel filtro o que impossibilita a análise pelo laboratório.

MÚTIPLAS GOTAS SOBREPOSTAS



Múltiplas e pequenas gotas foram adicionadas em uma só mancha, criando camadas de sangue com espessuras heterogêneas. As manchas devem ser formadas por grandes gotas.

MANCHAS DE SANGUE MUITO PEQUENAS

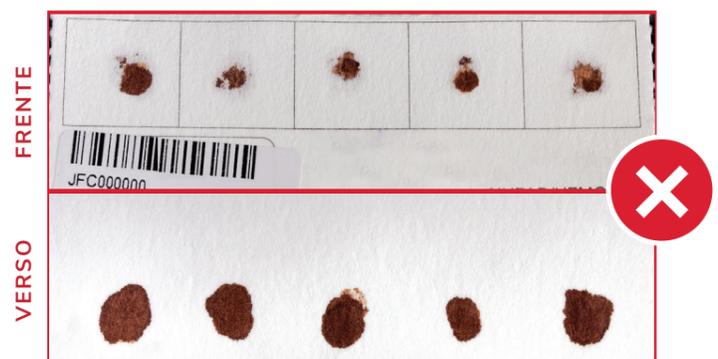

As manchas colhidas na frente do papel filtro são muito pequenas. Houve tentativa de completar colocando nova gota no verso. As gotas só podem ser colhidas na frente.



Para ver o guia completo, assista o vídeo disponível em:
www.nupad.medicina.ufmg.br/coleta-amostras