

As normas técnicas de coleta são baseadas nas seguintes recomendações internacionais:



Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Blood Collection on Filter Paper for Newborn Screening Programs; Approved Standard – Fifth Edition. CLSI document LA4-A5 (ISBN 1-56238-644-1). Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1440, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2007.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Procedures and Devices for the Collection for Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard – Sixth Edition. CLSI document H04-A6 (ISBN 1-56238-677-8). Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1440, Wayne, Pennsylvania 19087-1898 USA, 2008.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

-  **0800-722-6500 - Call Center Nupad.**
Ligue gratuitamente de um **telefone fixo**. A linha está disponível para profissionais da saúde, nos dias úteis, de 8h às 17h.
-  **(31) 3409-8900 - SMC Nupad.**
Chamada direta para o Setor de Controle do Tratamento - Nupad. Linha disponível nos dias úteis, de 8h às 17h.
-  E-MAIL: **sct@nupad.medicina.ufmg.br**
-  SITE Nupad: **www.nupad.medicina.ufmg.br**



INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE



Instruções de uso:
LANCETA ROXA
Normas para utilização do novo dispositivo de punção
PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL DE MINAS GERAIS



Normas para utilização do NOVO DISPOSITIVO DE PUNÇÃO - PTN-MG.



Conforme a norma **NR32** do **Ministério do Trabalho e Emprego**, a lanceta de aço tradicionalmente utilizada no **Programa de Triagem Neonatal de Minas Gerais**, também conhecido como “**teste do pezinho**”, deverá ser substituída por dispositivos retráteis de segurança.

Atendendo as recomendações internacionais do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), e as novas exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, o **Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnóstico – Nupad** está encaminhando as novas lancetas, na cor roxa, para realização do teste do pezinho.

Estas lancetas são confeccionadas em plástico rígido e com design ergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurança onde a agulha retrátil é acionada por gatilho para fácil manuseio e segurança do profissional de saúde no ato da punção. Possui agulha com 2,0mm de profundidade e 1,5mm de largura. Essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 500 microlitros, permitindo assim o preenchimento adequado dos cinco campos de coleta do papel-filtro com uma única punção.


Instruções de uso:

LANCETA ROXA

Normas para utilização do novo dispositivo de punção.
PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL - MG.

Preparando a Lanceta

1. Segurando a lanceta pelas bordas, **destrave** a tampa protetora **girando 360° ou mais**.
2. **Retire** a tampa protetora, **puxando-a para baixo**.

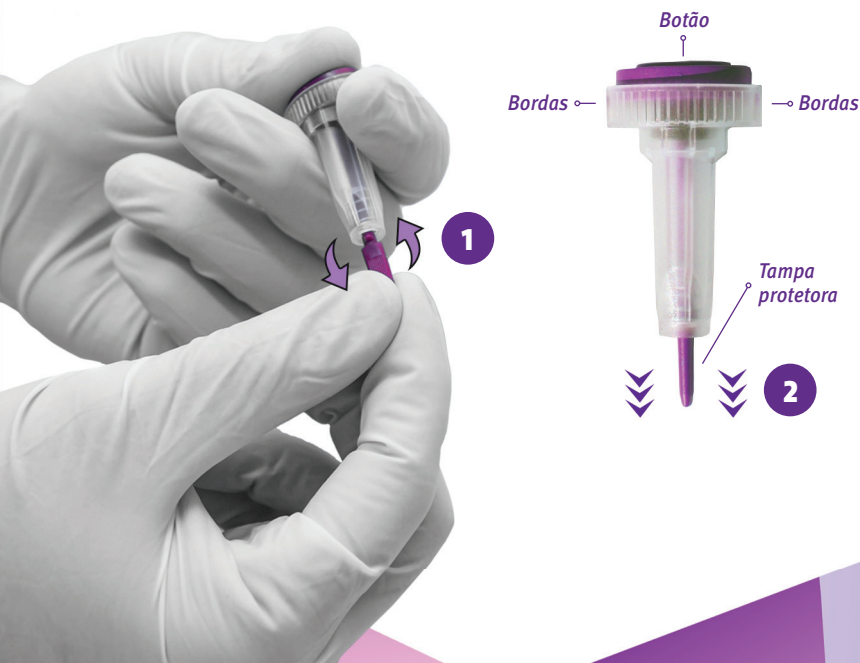

Punção no Calcanhar



3. Posicione a lanceta perpendicularmente no local da punção e **pressione o Botão (Gatilho)** para dispará-la.
4. Aguarde formar uma **grande gota**.

IMPORTANTE: Não se esqueça de **lavar as mãos** e **calçar as luvas de procedimento** antes de preparar a lanceta e realizar a punção.



ATENÇÃO: Esta lanceta possui o formato em lâmina, projetada para a obtenção de um bom fluxo de sangue no **calcanhar**.

Em **HIPÓTESE ALGUMA** deverá ser utilizada para outras finalidades como glicemia capilar e punção digital para outros testes, pois poderá **causar danos se for utilizada nos dedos, seja de crianças ou adultos**.



Identificação do local **CORRETO** para Punção:

Porções laterais da região plantar do calcanhar

Após a punção, **DESCARTAR** a lanceta na caixa de perfurocortante.

